

Elektro-Rollstuhl Via (B+B)

- [Inbetriebnahme & erste Fahrt](#)
- [Falten & Transport](#)
- [Häufige Fragen zum Via](#)

Inbetriebnahme & erste Fahrt

Vor der ersten Fahrt den Akku vollstaendig laden (ca. 6-8 Stunden). Den Via auf ebener Flaeche entfalten, bis der Rahmen hoerbar einrastet. Einschalten am Bedienpanel rechts, Geschwindigkeitsstufe 1 waehlen. Steuerung ueber den Joystick: sanft in Fahrtrichtung druecken, loslassen bremst automatisch. Erste Fahrten im Innenbereich ueben.

Falten & Transport

Der Via ist in drei Schritten faltbar: Fussplatte hochklappen, Entriegelung am Rahmen ziehen, Rueckenlehne nach vorn fuehren. Gefaltet passt er in jeden gaengigen Kofferraum. Wichtig: Vor dem Falten das Geraet ausschalten. Beim Transport im Auto den Rollstuhl gegen Verrutschen sichern. Gewicht: ca. 25 kg inkl. Akku.

Häufige Fragen zum Via

Wie weit komme ich mit einer Akkuladung?

Ca. 25 km, abhängig von Gewicht, Gelände und Temperatur.

Darf ich den Via mit in Bus und Bahn nehmen?

Ja, als faltbarer E-Rollstuhl mit 6 km/h ist er für den ÖPNV geeignet.

Was passiert bei einer Panne?

Kontaktieren Sie unseren Service — Kontaktdaten finden Sie im Shop unter "Service".