

Falten & Transport

Der Via ist in drei Schritten faltbar: Fussplatte hochklappen, Entriegelung am Rahmen ziehen, Rueckenlehne nach vorn fuehren. Gefaltet passt er in jeden gaengigen Kofferraum. Wichtig: Vor dem Falten das Geraet ausschalten. Beim Transport im Auto den Rollstuhl gegen Verrutschen sichern. Gewicht: ca. 25 kg inkl. Akku.

Created 2026-07-13 16:24:27 UTC by Admin

Updated 2026-07-13 16:25:20 UTC by Admin